

Push-To-Set™ Intermittierende Absaugereinheit Digitalen (ISO/CE) Kinder / Neugeborene

BESCHREIBUNG UND ANWENDUNG

Die Ohio Medical® Kinder- und Neugeborenen-Push-To-SET™ Digital-Intermittent Absauggerät ist ein medizinisches Absauggerät zur kontinuierlicher oder intermittierender Vakuum kontrollierten aus einem Krankenhaus-Pipeline Vakuumsystem zu liefern. Es bietet die Vielseitigkeit eines intermittierenden Modus für nasogastric Drainage und einem kontinuierlichen Modus zur Tracheal-, Rachen-, oder chirurgischen Absaugung. Die Modelle für Kinder und Neugeborenen sind so konzipiert, dass eine möglicherweise unsichere Anpassung des Vakuums über einen voreingestellten Vakuumgrenzwert hinaus verhindert wird. Dieses Gerät ist ideal für Neugeborene und pädiatrische Patienten oder sensible Anwendungen, bei denen die Begrenzung des höchsten Vakuumwertes wichtig ist. Der intermittierende Modus verwendet eine pneumatisches Logikelement für das automatisch „AN-“ und „AUS-Schalten“ der Absaugung. Dieses einzigartige Unilogic-Zeitmodul legt den Industriestandard für leise und verlässliche, intermittierende Absaugung fest. Das pädiatrische Modell ist von 0-18,0 kPa (0-135 mmHg) und das Modell für Neugeborene von 0-13,3 kPa (0-100 mmHg) einstellbar, um die Anforderungen für klinische Absaugung im untersten Bereich zu erfüllen. Es enthält auch ein Überdruckventil, um potentielle Verletzungsgefahren für den Patienten und Ausrüstungsschäden bei vorübergehendem Anschluss an einen Überdruckgasanschluss zu reduzieren.

Die Kinder- und Neugeborenen-Push-To-SET™ Intermittent Saugereinheiten sind ein geringer niedervakuum / hohe durchflussregler.

FUNKTIONEN UND VORTEILE

- **EXKLUSIV!** Patentierte Push-To-Set™-Funktion
Verbessert die Patientensicherheit
Kann unvorhergesehenes, unregelmäßiges Absaugen verhindern
Einfache Einhandbedienung
- **Das Babysymbol kennzeichnet Modelle, die nur für Kinder und Säuglinge verwendet werden können.**
- **Unterdruckventil**
Das pädiatrische Modell ist werkseitig auf 18,9 kPa (135 mmHg) eingestellt.
Das neonatale Modell ist werkseitig auf 13,3 kPa (100 mmHg) eingestellt.
- **Unilogic-Zeitmodul**
Pneumatische, ruhig, zuverlässigen Betrieb
Versandkosten auf Atmosphärendruck während „AUS“-Zyklus
Zeitzyklen
Selbständig einstellbar 3 bis 30 Sekunden auf „EIN“ und „AUS“-Zyklen
Werkseitig eingestellte intermittierende Zeiteinstellung:
15 Sekunden AN/8 Sekunden AUS (±3 Sekunden)
Beginnt im „AN“-Modus
- **Durchflussrate**
Intermittierend – 0-13 l/min (bei 8 l/min gemäß ASTM)
Kontinuierlich – 0-80 l/min (nicht einstellbar) ohne Anschlussstücke, voll aufgedreht
- **Großes, einfach ablesbares, digitales Vakuummeter**
Farblich gekennzeichnete Bereiche
Unübertroffene Genauigkeit für mehr Sicherheit ± 1% der Gesamtskala
- **Sicherheitsfunktionen**
Automatischer Verschluss durch Push-To-Set™
Überdrucksicherheitsventil
- **Gängige modulare Bauteile**
Aufgrund gängiger Bauteile sind weniger Ersatzteile am Lager erforderlich
Vereinfachung von Wartungsmaßnahmen
Günstige Ersatzteile und Kits
- **Haltbares Design und Bauweise**
Wenige mechanische Teile
Robustes, schlagfestes ABS-Gehäuse
Korrosions- und schmierungsfrei
Wartungsfreie Rückwand
- **CE-Kennzeichnung**
- **Bestelloptionen**
Erhältlich in verschiedenen Konfigurationen, einschließlich Adaptern zum Anschluss an Vakuum und Optionen für Überlaufflaschen und Auffangbehälter.



Digitale Push-To-Set™
Intermittierende
Absaugvorrichtung für Kinder



Digitale Push-To-Set™
Intermittierende
Absaugvorrichtung für
Neugeborene

TECHNISCHE DATEN*

Durchflussrate

Intermittierend – 0-13 l/min (bei 8 l/min gemäß ASTM)
Kontinuierlich – 0-80 l/min (nicht einstellbar) ohne Anschlussstücke, voll aufgedreht

Zeiteinstellung

Einfach einstellbares, leises EIN-/AUS-Schalten
Werksseitig eingestellte intermittierende Zeiteinstellung: 15 Sekunden
AN/8 Sekunden AUS (±3 Sekunden)
Beginnt im „AN“-Modus

Vakuumbereich

Kinder: 0-18,0 kPa (0-135 mmHg)
Neugeborene: 0-13,3 kPa (0-100 mmHg)

Bereich des Vakuummeters

Kinder: 0-21,3 kPa (0-160 mmHg)
Neugeborene: 0-13,3 kPa (0-100 mmHg)

Genauigkeit des Vakuummeters

±1% Gesamtskala (1.6 mmHg) Kinder
±1% Gesamtskala (1.0 mmHg) Neugeborene

Abmessungen

16,5 x 7,1 x 12,2 cm (6,5" H x 2,8" B x 4,8" T)

Gewicht: 0,57 kg (1 lb 4 oz) (ohne Anschlussstücke und Adapter)

Batterie: Primär-Lithiumzellen: 2/3AA, 3,6V, 1,6 Ah

F.O.B.: Gurnee, IL

Angewandte Normen: ISO 10079-3 und ASTM F960

* Alle in den technischen Daten angeführten Werte sind Nennwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden.

VERSANDINFORMATIONEN

VERSANDGEWICHT

0,77 Kg (1 lb. 11 oz.) (ohne Anschlussstücke und Adapter)

Paketgröße

6,5" H x 10,5" B x 8" T (16,5 H x 26,67 B x 20,32 T cm)

Verpackungsart: Ein Stück pro Karton



Teilekonfigurator

87XX - XXXX - 9XX

Push-To-Set™ Serie

Adapter (Vakuumananschluss)

Kein Adapter mit 1/8 Zoll NPT-Innengewinde..	00
Britischer Standard (BOC-Typ).....	31
Deutscher Standard (DIN-Typ).....	32
Französischer Standard (AFNOR-Typ)	33
Nordischer Standard (AGA-Typ).....	34

Anschlussstücke (Patientenanschluss)

Kein Anschlussstück mit 1/8 Zoll NPT-Innengewinde.....	00
Schlauchnippel	01
Arretierungsbuchse	04
Arretierungsbuchse und Überlaufsicherung	05
Arretierungsbuchse, Überlaufsicherung und 1300-ml-Plastikflasche mit Wandschiene, Schlauch	06

Digitale Push-To-Set™ Intermittierende Absaugvorrichtung

Kinder

6373	Gebrochenes Weiß*
6Y73	Gelb
6B73	Blau
6L73	Rosa
6R73	Rot
6L73	Hellblau
6U73	Lila

Neugeborene

6372	Gebrochenes Weiß*
6Y72	Gelb
6B72	Blau
6K72	Rosa
6R72	Rot
6L72	Hellblau
6U72	Lila

*Standardfarbe

© 2018 Ohio Medical LLC. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält Informationen, die Unternehmenseigentum der Ohio Medical LLC und vertraulich sind. Die Nutzung dieser Informationen unterliegt der Genehmigung durch die Ohio Medical LLC. Jede andere Nutzung als die von der Ohio Medical LLC gestattete ist verboten. Die Bezeichnungen Ohio Medical sowie das Logo der Ohio Medical sind eingetragene Handelsmarken und Push-To-Set ist eine Handelsmarke der Ohio Medical LLC. U.S. Patent #6,623,463 (Push-To-Set™ Vakuum-System).



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Ohio Medical LLC
1111 Lakeside Drive
Gurnee, IL 60031 USA
866.549.6446 | ohiomedical.com
255452-DE (Rev. 6) 11/18