

## Venturi Backpack (ISO)

### DESCRIPTION ET APPLICATION

Source d'aspiration d'appoint

Le Venturi Backpack d'Ohio Medical® est conçu pour une utilisation avec des régulateurs d'aspiration. L'association du Venturi Backpack avec un régulateur d'aspiration produit l'unique système de venturi à fournir une aspiration régulée de haut débit depuis une source d'air médical ou d'oxygène gazeux. Ces systèmes au gaz sont silencieux et offrent un haut débit, moyennant une consommation de gaz minimale. Solution de remplacement à l'aspiration électrique, les combinaisons Venturi Backpack et régulateur d'aspiration sont idéales lorsque l'aspiration murale est limitée. Cette technologie de pointe assure une vraie aspiration régulée lors de l'emploi de gaz comprimé pour des applications cliniques sensibles, notamment :

- Assistance respiratoire supérieure
- Drainage gastrique
- Aspiration chirurgicale



Défecteur seulement  
6700-0310-500

Module éjecteur Venturi  
Backpack  
6700-0690-800  
(Disponible uniquement en noir)



Une variété de combinaisons de Venturi Backpack et régulateur d'aspiration est proposée pour répondre à vos besoins cliniques.



Venturi Backpack avec régulateur d'aspiration continu



Venturi Backpack avec unité d'aspiration intermittente



Venturi Backpack avec régulateur d'aspiration continu Push-To-Set™



Venturi Backpack avec unité d'aspiration intermittente Push-To-Set™

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Niveau d'aspiration régulée

0 à 500 mmHg maximum; limité à la plage du régulateur

### Débit (capacité d'aspiration)

> 30 l/min, unités continues et intermittentes

### Pression d'alimentation

Pompe de 310 à 552 kPa (45 à 80 psi)

### Consommation d'air comprimé à la pression d'alimentation

30 l/min sous une pression de 50 psi

36 l/min sous une pression de 60 psi

### Niveau de bruit

< 60 dBA sous une pression d'alimentation de 60 psi et débit d'aspiration libre et < 50 dBA avec débit d'aspiration de 10 l/min

### Dispositif de sécurité

Soupape à pression positive

### Entraînement (alimentation en gaz)

Air médical ou oxygène

### Cadrans de régulateur

Faciles à lire, échelle double

### Protection anti-débordement

Pièges à débordement et filtres d'aspiration proposés

### Réparation

Pièces de régulateur modulaires proposées

### Normes

ISO 10079-3

### Stérilisation

Oxyde d'éthylène

## SPÉCIFICATIONS D'ACHAT

En association avec le régulateur d'aspiration Ohio Medical®, le Venturi Backpack fait appel à un injecteur actif à deux étages pour produire une aspiration et un débit élevés et efficaces. La configuration Venturi Backpack est proposée pour tous les modèles de régulateurs d'aspiration continus (CVR) et pour l'unité d'aspiration intermittente (ISU) d'Ohio Medical. Elle est capable d'offrir des débits jusqu'à 30 l/min, à la fois aux réglages d'aspiration hauts et bas. Le Venturi Backpack est fourni avec un bouton de commande de la source de pression à action latérale séparé permettant un contrôle Marche/Arrêt facile. Le refoulement du venturi produit des niveaux de bruit de 60 dB ou moins lors de l'utilisation normale, pour respecter le confort des patients.

### Dimensions/poids sans piège à débordement

Venturi Backpack et régulateur d'aspiration continu :

Taille : 19 cm x 10,9 cm x 14 cm / 590 g

Venturi Backpack et régulateur d'aspiration continu PTS :

Taille : 21,6 cm x 9,9 cm x 16,5 cm / 590 g

Venturi Backpack et régulateur d'aspiration intermittent :

Taille : 17 cm x 10,9 cm x 12,4 cm / 1000 g

Venturi Backpack et régulateur d'aspiration intermittent PTS :

Taille : 21,6 cm x 9,9 cm x 16,5 cm / 667 g

## EXPÉDITION

### Poids à l'expédition\*

Venturi Backpack avec :

Régulateur d'aspiration continu: 698 g

Unité d'aspiration intermittente: 1152 g

Régulateur d'aspiration continu PTS: 737 g

Unité d'aspiration intermittente PTS: 822 g

### Taille de l'emballage (h x l x p)

Venturi Backpack avec :

Régulateur d'aspiration continu: 26,2 cm x 19,8 cm x 17,3 cm

Unité d'aspiration intermittente: 20,3 cm x 8,9 cm x 11,9 cm

Régulateur d'aspiration continu PTS: 26,7 cm x 19,7 cm x 17,8 cm

Unité d'aspiration intermittente PTS: 26,7 cm x 19,7 cm x 17,8 cm

**Emballage :** Un par contenant

\*Le poids à l'expédition n'inclut pas les raccords et adaptateurs

## Configuration des pièces

XX XX - XXXX - 9 XX

CVR et ISU ..... 67  
Push-To-Set™ CVR et ISU ..... 87

### Adaptateur (branchement source d'aspiration)

Sans adaptateur avec 1/8" NPT femelle..... 00  
Norme britannique (BOC)..... 31  
Norme allemande (DIN)..... 32  
Norme française (AFNOR) ..... 33  
Norme nordique (AGA)..... 34

### Type de régulateur d'aspiration (ISO/CE).....

Régulateur continu haut 3 modes- Air ..... 2229  
Régulateur continu haut 2 modes- Air ..... 2230  
Régulateur continu NEO 2 modes - Air ..... 2232  
Régulateur continu PED 2 modes - Air..... 2233  
Unité d'aspiration intermittente - Air ..... 2253  
Unité d'aspiration intermittente PED - Air ... 2273

### Raccords (branchement patient)

Sans adaptateur avec 1/8" NPT femelle..... 00  
Tubage tubulaire..... 01  
Trappe de sécurité à glissement et à débordement ..... 05

### Type de régulateur d'aspiration (ISO/CE)

Régulateur continu haut 3 modes - Oxygène .... 3229  
Régulateur continu haut 2 modes - Oxygène ..... 3230  
Régulateur continu NEO 2 modes - Oxygène .... 3232  
Régulateur continu PED 2 modes - Oxygène..... 3233  
Unité d'aspiration intermittente - Oxygène ..... 3253  
Unité d'aspiration intermittente PED - Oxygène . 3273

EXEMPLE : 8701-2233-905 Régulateur d'aspiration continue pédiatrique à deux modes Push-To-Set™ avec adaptateur Ohio Diamond, bague de verrouillage et piège à débordement.

© 2018 Ohio Medical LLC. This document contains information that is proprietary and confidential to Ohio Medical LLC. Use of this information is under license from Ohio Medical LLC. Any use other than that authorized by Ohio Medical, LLC is prohibited. Ohio Medical, and the Ohio Medical logo are registered trademarks and Push-to-Set is a trademark of Ohio Medical LLC.



EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Ohio Medical LLC  
1111 Lakeside Drive  
Gurnee, IL 60031 USA  
866.549.6446 | ohiomedical.com  
255544-FR (Rev. 4) 11/18