

## Regolatore di vuoto flusso libero/uso chirurgico (ISO)

### DESCRIZIONE E APPLICAZIONE

Il regolatore di vuoto flusso libero/uso chirurgico Ohio Medical® è stato progettato specificatamente per fornire portata elevata e manutenzione minima in sale operatorie e in qualsiasi altra situazione in cui siano richiesti livelli di aspirazione elevati. Esso fornisce un campo completo di aspirazione affidabile per tutte le procedure di aspirazione a flusso continuo ed è dotato di molte caratteristiche convenienti, e semplici da usarsi, che facilitano l'aspirazione in ambiente chirurgico e/o di emergenza.

L'esclusivo meccanismo di regolazione diretto del Flusso libero/chirurgico sostituisce il complesso circuito di vuoto presenti in molti altri sistemi di regolazione. Esso fornisce una portata di 150 LPM massima ed evita l'accumulo di aerosol e filaccia che ostruisce altri regolatori. L'unità si classifica come alto vuoto/alto flusso. Il misuratore di vuoto elevato è adatto ad una vasta gamma di applicazioni.

Il regolatore flusso libero/uso chirurgico può essere usato anche come strumento diagnostico per verificare la pressione massima delle prese a paret.



Alto flusso libero/uso chirurgico  
 • Manometro 0-101.3 kPa  
 • Manometro 0-760 mm di Hg

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- **Controllo aspirazione diritto passante**  
 Fornisce alta portata di aspirazione senza resytrizioni sino a 150 LPM  
 Minimizza le ostruzioni e riduce il tempo di fermo
- **Regolazione sull'intero campo**  
 Regolabile sull'intero campo di vuoto disponibile  
 Regolazione automatica  
 Selezione di aspirazione controllata o completamente aperta
- **Manometro grande di facile lettura**  
 Faccia dello strumento di 6,5 cm (2,5 pollici)  
 Vetro di copertura convesso che riduce il riflesso
- **Interruttore di comutazione rapida ON/OFF (ACCESO/SPENTO)**  
 Posizione ON (ACCESO) visibile  
 Si accende a valore prestabilito
- **Finestra diagnostica**  
 Osservazione diretta dei meccanismi  
 Accesso rapido e semplice per pulizia e riparazioni  
 Chiave esagonale in dotazione
- **Grande manopola di comando**  
 Facile da regolare  
 Risposta rapida; un solo giro da OFF (SPENTO) a vuoto assoluto
- **Costruito e progettato per durare a lungo**  
 Pochi pezzi meccanici  
 Involucro robusto e infrangibile
- **Marchio CE**
- **Opzioni per l'ordinazione**  
 Disponibile in varie configurazioni che includono sonde per il collegamento alla sorgente di vuoto. Disponibile anche con opzioni per dispositivi di raccolta e protezione di sicurezza da stravasato.

## Alto flusso libero/uso chirurgico

- 0-101.3 kPa (0-760 mm di Hg) - Manometro alto vuoto
- Portata elevata
- Poca manutenzione e facile da eseguire
- Comandi e manometro affidabili e comprovati
- Manometro di facile lettura
- Manopola di comando dell'aspirazione a risposta rapida
- Interruttore di rapida commutazione della modalità

### Specifiche\*

#### Portata

0-150 LPM senza accessori al massimo incremento

#### Precisione del manometro

± 5% deflessione scala completa

#### Dimensioni

14,5 cm altezza x 7,62 cm larghezza x 9,65 cm profondità  
(5,7 pollici x 3 pollici x 3,8 pollici)

#### Peso

0,680 kg (1 libbra e 8 onces)

### Standard applicati

ISO 10079-3

\* Le specifiche rappresentano valori nominali soggetti a modifica senza preavviso.

### Informazioni di spedizione

#### Peso di spedizione

1,0 kg (2 libbre e 3 onces) senza accessori e raccordi

#### Dimensione della confezione


26,16 cm altezza x 19,8 cm larghezza x 17,27 cm profondità  
(10,3 pollici x 7,8 pollici x 6,8 pollici)

#### Confezione

Un'unità per scatola

Per maggiori informazioni mettersi in contatto con il rivenditore Ohio Medical o con il rappresentante autorizzato locale.

## Configurazione dei pezzi

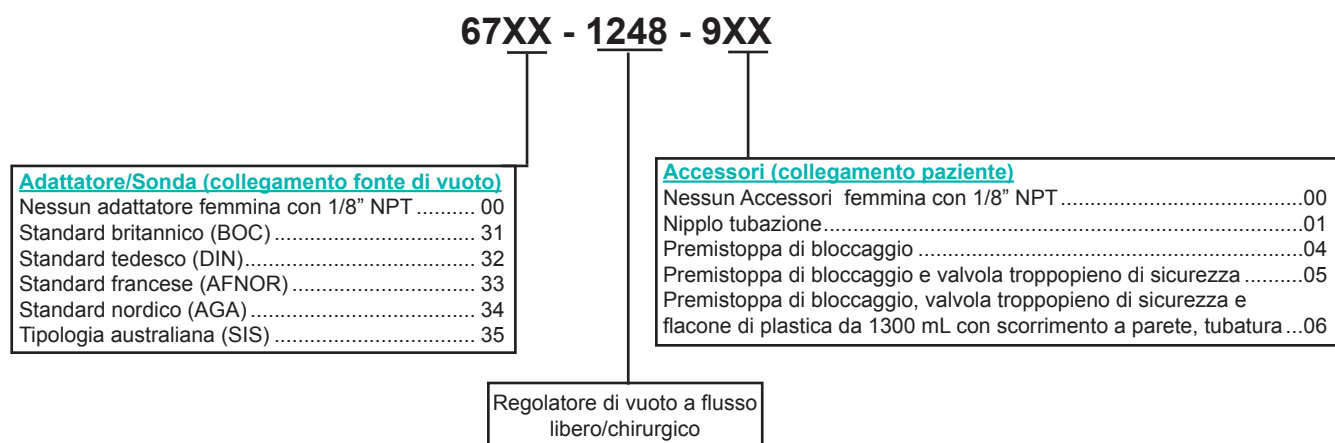

© 2017 Ohio Medical LLC.

Il presente documento contiene informazioni riservate di proprietà di Ohio Medical LLC. L'uso delle presenti informazioni è soggetto a licenza da parte di Ohio Medical LLC. Qualsiasi uso diverso da quanto autorizzato è vietato da Ohio Medical LLC.

Ohio Medical ed il logo di Ohio Medical sono marchi registrati di Ohio Medical LLC.



Ohio Medical  
1111 Lakeside Drive - Gurnee, IL 60031 USA  
Phone: +1 847 855 0500 - Fax: +1 847 855 6218  
www.ohiomedical.com  
550036-IT-SFF (Rev. 2, 01/2017)



### Ohio Medical Authorized Representative



OxygenCare Ltd.  
2 Holfeld Business Park  
Kilmacanogue Co Wicklow Ireland  
Tel: +353 1 2769700 - Fax: +353 1 2764970